



Tel: +33 (0)4 68 68 39 68
Fax: +33 (0)4 68 68 39 68

info@aivia.eu

FÖRINSTALLATIONSHANDBOK FÖR VÄGGHÄNGD AIVIA







A-DPM

V2.05 1/2
2019-02-11



- **Installera aldrig Aivia så att den utsätts för direkt solljus. Det finns risk för att hjärtstartaren utsätts för alltför höga temperaturer.**
- Aivia drivs med mycket låg spänning för att vara säker för människor (Aivia drivs med 4 LR20-batterier).
- Installation och elektriska åtgärder bör ske i enlighet med gällande riktlinjer som gäller i landet där produkten ska installeras.
- **Pyrescom SAS avsäger sig allt ansvar om föreskrifterna inte följs.**

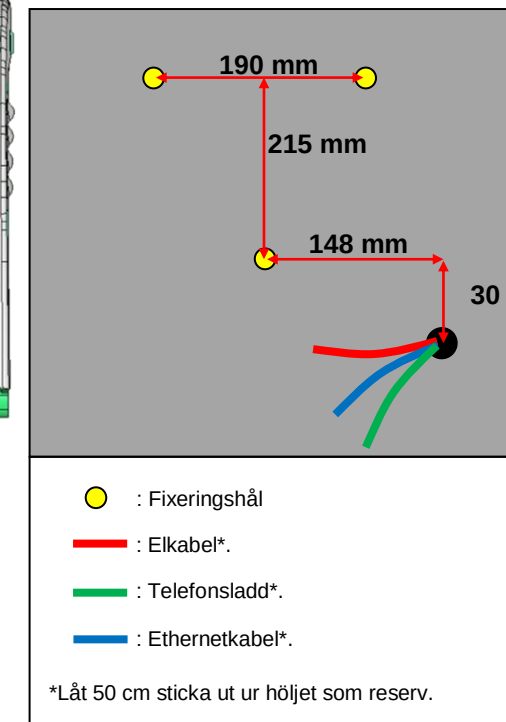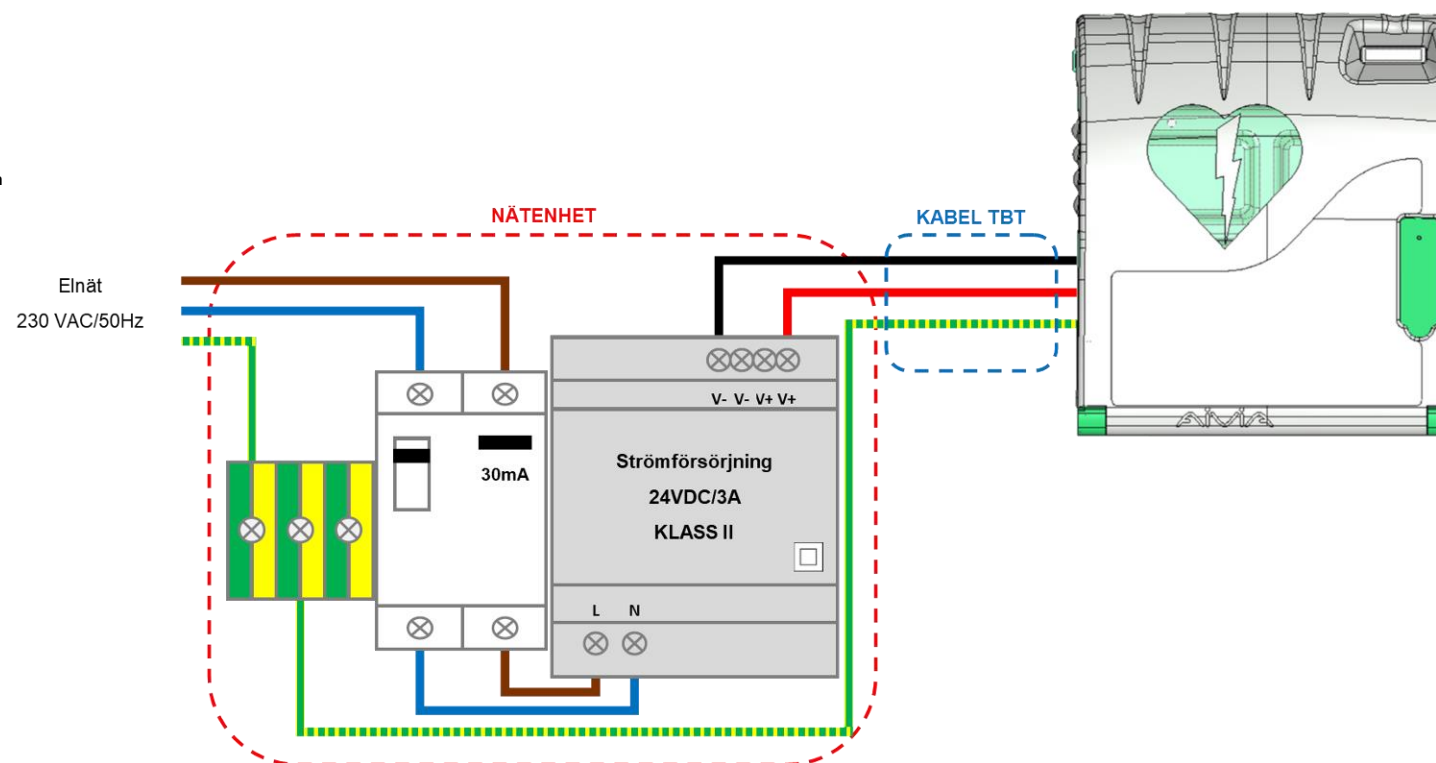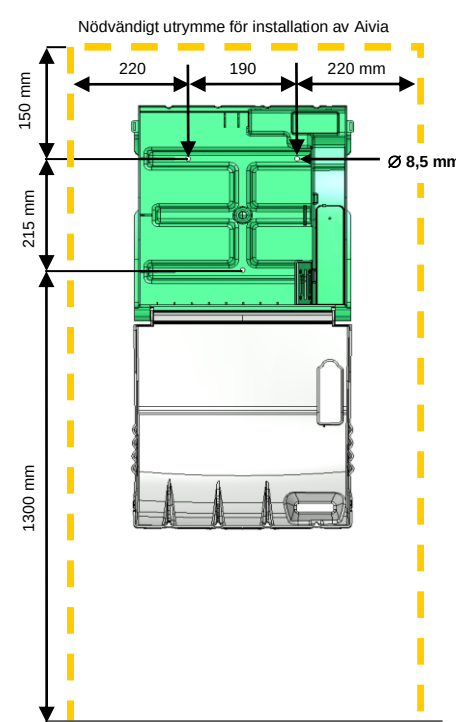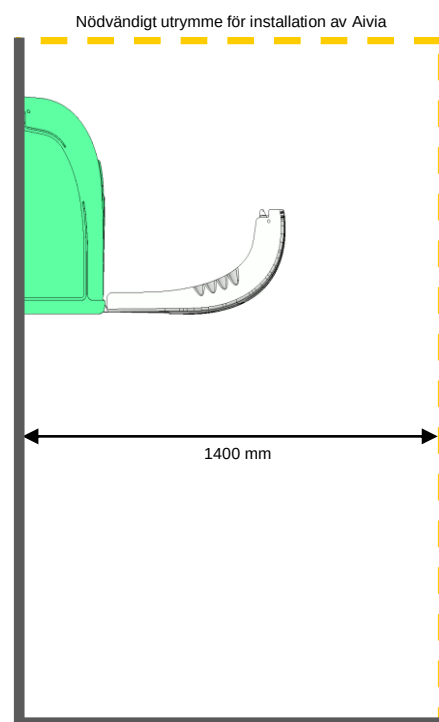

FASTSÄTTNING I HÅLLAREN

- Aivia bör monteras av en person som har nödvändiga yrkesmässiga kunskaper och som följer Bornavie.
- Säkerställ att hållaren är stadig. Fästet bör anpassas till den typ av hållare som Aivia ska fästas vid.
- Lämna ett fritt arbetsutrymme runt Aivia, som visas i bilden ovan.
- Om Aivia installeras i ett offentligt utrymme eller i ett område med förbipasserande ska ett område på golvet (avgränsat) eller en pelare förberedas så att förordningen av den 15 januari 2007 "Tekniska föreskrifter om tillträde till vägar" Artikel N°6-D, följs.
- Borrshablonen medföljer Aivia. Den finns även i dokumentet A-DPM-GABARIT.
- Aivias fäste bör kunna tåla en belastning på minst 20 kg.

STRÖMFÖRSÖRJNING

(Alla modeller utom Aivia 100)

NÄTENHET:

Den ska finnas på Aivias utsida. Låt den aldrig bli kvar inuti Aivia.

Nätenheten ska bestå av:

- Ett kopplingsbleck för anslutning till jord.
- En jordfelsbrytare 10A/30mA. Skyddsanordning och an ordning för att isolera materialet.
- En strömkälla* 24 VDC/3A KLASS II.
 - Strömkällan ska ha begränsad effekt.
 - Den ska kopplas på fas, nolla och jord.
 - Det högsta sekundärspänningsfallet vid full laddning ska inte överskrida 2 %, eller 23,5 V, vid Aivias kopplingsplint.
 - Nätenhetens inandöme ska skyddas från damm och vatten och vara ventilerat.**.
 - Nätenhetens kablage ska följa de riktlinjer som gäller i landet där produkten installeras.

KABEL TBT:

- Typ U1000R2V. 2 isolerade ledare med skyddshölje, 1,5 mm² kabelarea, max. 10 m längd.

- Använd den röda eller bruna kabeln för +24 V.
- Använd den svarta eller grå kabeln för 0 V.
- Använd den gröna/gula kabeln för huvudjorden.
- **Endast Aivia-enheter som är anslutna till telefont nätet måste absolut vara anslutna till huvudjord.**

* Rekommenderad strömförsörjning: PYRESCOM C_AL/HDR100-24CA.

** Naturlin eller forcerad konvektion beroende på omgivningen och värmeegenskaper vid maximal drift

TELEFONI

(Aivia 220 230 320 330)

- **Analogt telefontnät*:** Direkt eller på en intern linje via en telefonväxel. Kabeltyp: 4-parig telekabel.
- **GSM*:** Kontrollera på ort och ställe att det finns täckning med den tilltänkta operatören.

* Abonnementet betalas av kunden.

INTERNETÅTKOMST

(Aivia 300 310 320 330)

- **Lokalt Ethernetnätverk*:** med internetåtkomst. Protokoll HTTP port:80. Kabeltyp: 1 Ethernetkabel CAT5 FTP eller högre.
- **GPRS*:** Kontrollera på ort och ställe att det finns täckning med den tilltänkta operatören.

* Abonnementet betalas av kunden.