



- Isoleret, rostfritt stålskåp
- Frostsäkert till (-20°C)
- Fläkt för ventilation
- 2 x LED-lampor (*hjärtstartaren är synlig i mörker*)
- Konstruerat så att det kan öppnas även under påverkan av stora mängder snö och frost.
- Framtidssäkrat! (*program kan uppgraderas*)

FUNKTIONSBESKRIVNING:

Öppnar man luckan på skåpet ...	ljuder LARMSIGNALEN omedelbart. (<i>stängs luckan inte igen inom 3 minuter slutar LARMSIGNALEN automatiskt</i>)
är luckan stängs ...	är skåpet klart för drift igen.

TEKNISK BESKRIVNING:

Lucka:	Luckan har termoglas och är försedd med internationella AED-etiketter/symboler.
Belysning:	2 x LED-lampor i skåpet, så att man kan se hjärtstartaren i mörker.
Ljudlarm:	Ljudlarm i skåpet. (87dBA/1 m)
Fläkt:	Fläktventilation, startar vid +40°C.
Skåp frostfritt:	Termostatstyrt värmeelement. Frostsäkert till -20°C
Spänning:	Anslutningsspänning 230VAC. 50 Hz. (66W). Max. säkring 10A. Använd utomhuskabel (3 x 1,5 mm ²) Cat II, IE IEC 61010-1
Överspänningskategori:	IP43.
Täthetsklassificering:	-20 / +40°C
Omgivningstemperatur:	0 – 95 %
Relativ luftfuktighet:	2
Miljö – föroreningsgrad:	Högst 2000 m.ö.h. (<i>meter över havet</i>)
Höjd på användningsområden:	IEC61010 - med avvikelser för isoleringens brandklass och servicebrytare.
Designstandard:	E / F (EN13501)
Isolering – brandklass:	
Utvändiga mått:	B x H x D = 44 x 46 x 27 cm (<i>inkl. luckhandtag</i>)
Invändiga mått:	B x H x D = 33 x 38 x 20 cm
Vikt:	Bruttovikt inkl. emballage 18,5 Kg.

SJÄLVTEST:

För att säkerställa att fläkten och värmeelementet fungerar rekommenderas ett självtest 1–2 gånger per år.
Bryt strömmen till skåpet. När strömmen åter kopplas på hörs ett "BLIP" och självtestet startar.
Värmeelementet och fläkten körs nu i 1 minut och därefter hörs ett "BLIP" som indikerar att testet är slut.

(*Känn under bottenplattan på höger sida av skåpet om värmeelementet blir varmt. Kan man inte känna värmen, upprepas testet 2–3 gånger.*)

UNDERHÅLL/RENGÖRING:

Vi rekommenderar utvändig rengöring av skåpet åtminstone 1-2 gånger per år.
Använd tvättmedel på en fuktig trasa eller borste och skölj med rent vatten. Torka sedan med en torr trasa.

Om ytan blir anlöpt, är detta avlagringar som lätt kan tvättas bort.
Till besvärliga avlagringar används en skursvamp. **Använd aldrig stålull.**