

1. Placering av skåp.
2. Skåpet monteras på vägg eller stativ.
3. Elanslutning. 230 V spänning tillförs via HPFI-relä.
4. Självtest av uppvärmning och fläkt vid ström PÅ.
5. Datablad.
6. Underhåll/rengöring.


1. Rekommenderad monteringshöjd (se ritning)

Skåpet är gjort för att klara upphängning under alla normala förhållanden.


Med tanke på underhållet är det alltid en fördel att hänga upp hjärtstartarskåpet i så lite direkt solsken som möjligt. Om skåpet monteras under ett halvtak där det inte utsätts för naturlig avtvättning (*regnvatten*) rekommenderas att skåpet tvättas ofta, då det annars kan uppkomma avlagringar.

Miljö:	För inomhus- och utomhusbruk
Täthetsklassificering:	IP 43 – tål kraftigt regn, men får inte sköljas.
Höjd:	Kan användas på höjder upp till 2000 m.ö.h.
Temperaturer:	-20 till +40 °C.
Relativ luftfuktighet:	0 – 80 %
Överspänningskategori:	Cat II
Föroreningsklass:	Grad 2

Wall side view

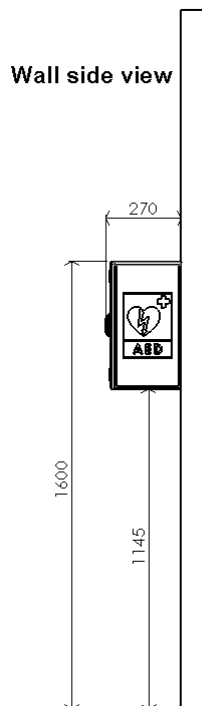

Wall viewed from the front

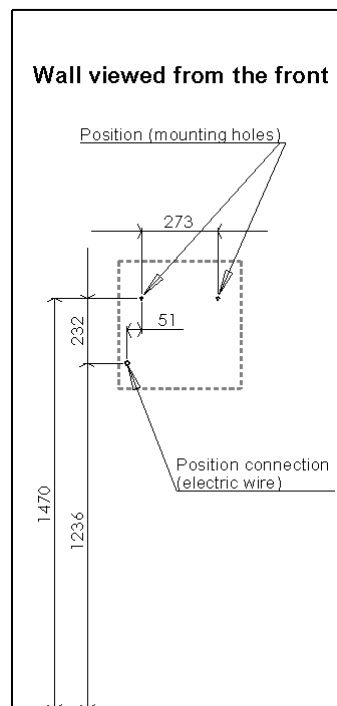

2. Skåpet monteras på vägg eller stativ genom de två hålen i bakplattan.

(Väggen måste vara jämn och stabil. SKÅPET FÅR INTE VRIDAS)



3. EL-INSTALLATION SKA UTFÖRAS AV BEHÖRIG EL-INSTALLATÖR

Skåpet måste försörjas med 230 V, helst från en egen el-grupp.


PG M16 och blindpropp kan monteras baktill på skåpet eller i botten, i enlighet med önskad installation.



Lossa de två umbrakoskruvarna i täckplåten med LED-belysning och sväng ut plåten.



Nu är det fritt tillträde till styrningen där fas-, noll- och jordledning ska anslutas.

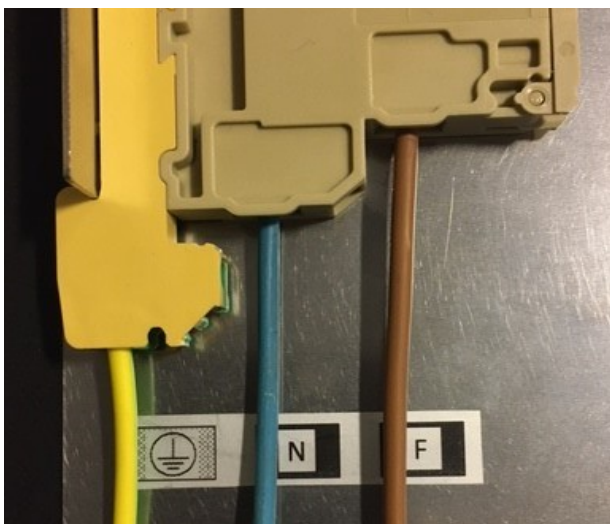

-
4. För att säkerställa att fläkten och värmeelementet fungerar rekommenderas ett självtest 1–2 gånger per år. Bryt strömmen till skåpet. När strömmen åter kopplas på hörs ett "BLIP" och självtestet startar. Värmeelementet och fläkten körs nu i 1 minut och därefter hörs ett "BLIP" som indikerar att testet är slut. *(Känn under bottenplattan på höger sida av skåpet om värmeelementet blir varmt. Kan man inte känna värmen upprepas testet 2–3 gånger)*
-

5. Datablad:
Den elektriska anslutningen MÅSTE skyddas av ett HFI-strömrelä – 30mA.
Anslutningsspänning 230VAC. 50 Hz. Max. säkring 10A. (Fas, noll och jord)
Utomhuskabel, 3 x 1,5 mm² för säkringsklämma med 2A sandfylld fin-säkring Ø5x20 – brytningsförmåga 1500A
(RS-artikelnr 563-413A)

Strömförbrukning vid normal drift = 40 mA / 10,2W
Max. strömförbrukning, inklusive värmare = 289 mA / 66 W

6. Underhåll/rengöring:
Vi rekommenderar utvändigt rengöring av skåpet åtminstone 1–2 gånger per år.
Använd tvättmedel på en fuktig trasa eller borste och skölj med rent vatten. Torka sedan med en torr trasa.
Om ytan blir anlöpt, är detta avlagringar som lätt kan tvättas bort.
Till besvärliga avlagringar används en skursvamp. **Använd aldrig stålull.**
-