

Checklista för Hjärtstartare

Inom sjöfartssektorn är en fungerande hjärtstartare livsviktig. Oavsett om du arbetar på ett fartyg, en offshoreplattform eller i en hamn kan snabb och effektiv hjärt-lungräddning göra hela skillnaden. Därför är det viktigt med regelbundet underhåll och kontroll av din hjärtstartare.

Nedan följer en praktisk checklista som hjälper dig att hålla din hjärtstartare funktionsduglig och redo för användning.



Elektrodernas hållbarhetstid

Elektrodernas utgångsdatum finns på förpackningen. Gamla elektroder leder inte ström lika bra, vilket kan leda till att den livräddande chocken inte blir effektiv. Därför är det viktigt att dina elektroder är i gott skick.

Förpackning av elektroder

Är elektrodernas förpackning oskadad? Öppnade eller skadade förpackningar kan leda till att den ledande gelen torkar ut, vilket minskar elektrodernas effektivitet.



Statusindikator

Positiv indikator - ofta en grön (blinkande) lampa: Alla system fungerar! Din hjärtstartare är redo att användas.

Negativ indikator - ofta en röd (blinkande) lampa, ibland med ljudsignaler: Det finns ett problem, kontrollera omedelbart vad som är fel och läs bruksanvisningen



Komplett räddningssats medföljer

Levereras din hjärtstartare med en komplett räddningssats? Detta kit innehåller allt du behöver vid återupplivning, t.ex. sax, rakhyvel, desinfektionsmedel, andningsmask och handskar.

[Se räddningssatsen här](#)

Är du osäker eller har du några frågor?

Har du frågor om hjärtstartare eller underhåll? Är du osäker på statusen på din hjärtstartare? Eller vill du helt enkelt bara ställa en fråga eller be om råd? Medisol hjälper dig gärna!

[Visa kontaktalternativ](#)